

Instruções para coleta de pelos



1. Puxe (não corte) os pelos contra o seu próprio sentido.



2. Certifique-se de que os pelos estão livres de sujidades. Os bulbos devem estar claramente visíveis e são necessários 50 bulbos íntegros.



3. Escreva a Identificação do animal no espaço destinado no cartão coletor.



4. Abra o cartão e levante o adesivo plástico.



5. Insira os bulbos no centro do cartão coletor e feche-o, selando a amostra com o adesivo plástico. Coloque o lacre no espaço indicado.



6. Corte o excesso de pelos, coloque todos os coletores em saco plástico para envio ao laboratório.



Neogen Deoxi Operations
Rua Duque de Caxias, 1950
Bairro Saudade - CEP: 16020-225; Araçatuba - SP
Fone: (18) 3301-9949
E-mail: igenity@neogendobrasil.com.br

