

Instruções para coleta de sangue


Duas ou três gotas de sangue no espaço de coleta do cartão são suficientes, podendo ser coletadas de qualquer parte do animal. Dois locais de fácil identificação de vasos sanguíneos são a orelha e embaixo da cauda.



1. Contenha apropriadamente o animal. Localize uma veia por visualização ou palpação. Limpe bem o local para que não contamine a amostra com esterco ou sujidades. Utilize uma agulha ou lanceta nova para cada animal.



2. O sangue também pode ser coletado com uma seringa ou tubo para sangue na veia abaixo da cauda. Isto pode ser mais fácil do que coletar o sangue de uma veia na orelha que é coberta com pelo.

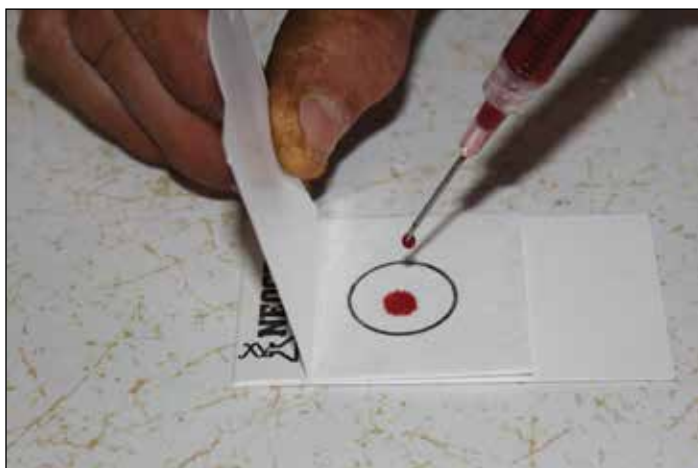

3. Colete duas ou três gotas de sangue na porção indicada do coletor, deixando sempre que a gota caia diretamente sobre o cartão. Não encoste ou esfregue agulhas, orelha ou cauda no cartão. Descarte a agulha em local adequado.



4. Antes de colocar a amostra de sangue no cartão coletor, faça a anotação do cliente e Identificação do animal no cartão. Deixe que a amostra seque com o cartão aberto antes de fechá-lo.



Neogen Deoxi Operations
Rua Duque de Caxias, 1950
Bairro Saudade - CEP: 16020-225; Araçatuba - SP
Fone: (18) 3301-9949
E-mail: igenity@neogendobrasil.com.br

